

komfort

Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zdravotnictví

Nemocnice, které na Vás záleží

Nemocnice Strakonice prochází rekonstrukcí. Součástí obnovy byl i nákup lůžek značky LINET.



Stop dekubitům

Editorial

Opakování je matkou moudrosti



Dekubitům se na stránkách Komfortu věnujeme opakovaně. A není to proto, že bychom neměli dostatek jiných zajímavých témat. Připomínáme toto téma především proto, že bolestivé a nebezpečné proleženiny stále patří k realitě při hospitalizaci. A děje se tak i přes všechny moderní technologie a přes neustálé vzdělávání nemocničního personálu. Kde je zakopaný pes, není jednoduché odpovědět. Příčin je více, ale v jedné se shodneme i s odborníky, třeba s Ninou Müllerovou z Fakultní nemocnice Plzeň, s níž problematiku dekubitů konzultujeme. Nejúčinnější v boji s dekubity je prevence a o možnostech preventivních opatření je potřeba neustále mluvit, připomínat a opakovat si je.

V aktuálním Komfortu proto naleznete informace nejen o našich výrobcích, které při prevenci a terapii dekubitů pomáhají, ale i o odborných a veřejných akcích, které naše společnost dlouhodobě podporuje.

Co je naopak v tomto čísle Komfortu zcela nového, je rubrika Slovensko. Po několika článcích, v nichž jsme představili situaci na slovenském trhu se zdravotnickou technikou a naše zajímavé referenční projekty, jsme se rozhodli dát našim nejbližším sousedům pravidelný prostor. A protože si vzájemně rozumíme, bude nová rubrika v jazyku nám nejbližším – slovenštině. Věříme, že Vás, naše stálé čtenáře, témata zaujmou a věnujete jim svoji pozornost. Zároveň bych na tomto místě také chtěl přivítat naše nové slovenské čtenáře, kterých stále přibývá. Věřím, že vzájemné poznání i v takových oblastech, jako je zdravotní a sociální péče, bude pro oba národy inspirativní a obohacující. Třeba když si přečtete, jak to chodí v Nemocnici Strakonice nebo v Ústavu tuberkulózy a plicních chorob ve Vyšných Hágách.

Přeji příjemné čtení.

Tomáš Kolář,
výkonný ředitel LINETu

Sledujte Eleganzu 2 na Youtube!

www.youtube.com/LinetMarketing



Nové lůžko Eleganza 2 si můžete skoro „osahat“ prostřednictvím videa na našem kanálu na www.youtube.com. Uvidíte v něm hlavní přednosti lůžka z výrazně přehlednou grafikou. Sledovat můžete i další produktová videa, která Vás seznámí s klíčovými lůžky i matracemi značky LINET.



BÝT PŘEDMĚTEM TOUHY, NIKOLI POUHÉ VOLBY



komfort

nová zdravotnická technika řešení péče o pacienta

čtvrtletník, říjen 2014, 11. ročník, číslo 03
zdarma

Vydává

LINET spol. s r. o.
Železčice 5, 274 01 Slaný
Česká republika
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668
e-mail: info@linet.cz, www.linet.cz

Redakce

Agentura 4JAN
Mgr. Silvie Neumannová, Ing. Jana Barčáková,
Petra Trnková
Varšavská 40, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 241 353, fax: +420 222 242 408
e-mail: neumannova@4jan.cz

Redakční rada

Zdeněk Grimm, Pavlína Horová,
Michaela Domerecká

Grafická úprava a zpracování

Multimedia atelier s. r. o.
Ivo Kubát, Jiří Masojídek

Tisk

Garamond s. r. o.
Registrace MK ČR E 15240

LINET je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, asociace CzechMed, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a členem European Pressure Ulcer Advisory Panel.



OBSAH

Více čtete uvnitř časopisu



Stop dekubitům 4

Dekubity představují problém, který se navzdory neustálému pokroku v medicíně dosud nepodařilo vymýtit. A ohrožuje prakticky všechny pacienty – mladé, starší a dokonce i dětské, krátkodobě i dlouhodobě upoutané na lůžko.



Již brzy na trhu: variabilní matrace Air2Care 6

Matrace Air2Care disponuje alternující terapií pomocí střídavého tlaku a nabízí více variant využití, přičemž práce s matrací je velice jednoduchá a uživatelsky přívětivá.



Tipy pro prevenci dekubitů 7

Pravidelné polohování pacienta patří k základním preventivním opatřením proti dekubitům. Zároveň patří k fyzicky náročným úkonům. Správným využíváním dostupných technologií můžete fyzickou námahu výrazně snížit.



Nemocnice, které na Vás záleží 8

Nemocnice Strakonice má nové vybavení, mimo jiné také 70 lůžek LINET Eleganza 1, která jsou umístěna na odděleních gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurologie a také 13 lůžek Eleganza 3XC, určených pro akutní péči, která najdeme na ARO a JIP.



Časy sa menia, prestíž Vyšných Hágov pretrváva 12

Súčasná vedenie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie vo Vyšných Hágoch, neustále zvyšuje kvalitu starostlivosti a obnovuje vybavenie. Súčasťou tohto procesu bol i nákup 3 lôžok Eleganza 2.

Kalendárium



SEMINÁŘE

13. 10.–16. 10. 2014: Praha, ČR

European Association of Neurosurgical Societies 2014

29. 10.–1. 11. 2014: Cancún, Mexico

Medicina Crítica 2014

6.–8. 11. 2014: Rio de Janeiro, Brazílie

Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva 2014

20. 11. 2014: Plzeň, ČR

Stop dekubitům

25.–26. 11. 2014, Praha, ČR

Nemocnice roku 2014



Vaše foto: Komfort zaujme příznivce všech věkových kategorií!

LINET uspěl ve Francii s pronájmem matrací

Společnost LINET Group zvítězila v tendru na pronájem 2 700 matrací. Ten vypsal asociace 50 univerzitních nemocnic v Paříži sdružených pod hlavičkou APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris). Tříletý kontrakt zahrnuje jak dodávku antidekubitních matrací Virtuoso a Precioso, tak návazné servisní služby spojené s pronájmem tohoto zařízení. Jeho odhadovaná hodnota se může vyšplhat až na 288 milionu korun.

První matrace LINET začne dodávat začátkem ledna příštího roku. „V segmentu rentingu se díky tomuto tendru posouváme na pozici jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu. Nedávno jsme ve Francii investovali do nového dekontaminačního centra, které slouží k čištění pronajatého vybavení. To nám společně s dvěma dalšími v Británii a jedním v Nizozemí zajišťuje dostatečnou kapacitu, aby-

chom dokázali pokrýt dlouhodobé dodávky pro zákazníky z většiny států západní Evropy, kde je renting stále populárnější,“ říká Miguel Aldegunde, manažer rentingových služeb v LINET Group. Renting matrací usnadňuje nemocnicím pružnější rozpočtování a snižuje riziko problémů s cash-flow.

Namísto jednorázového nákupu matrací v množství, které se po čase ukáže jako neadekvátní, si je zdravotnická zařízení mohou průběžně pronajímat vždy jen v potřebném objemu. Zároveň jim díky rentingu odpadá starost o servis zapůjčených výrobků. „Výhodou tohoto modelu je logicky i to, že si nemocnice mohou dovolit kvalitnější vybavení než při klasickém nákupu. V případě matrací tak mohou díky pokročilým technologiím značně posílit prevenci proleženin, které na celosvětové úrovni představují jeden z hlavních

zdrojů sekundárních nákladů spojených s nemocniční péčí,“ doplňuje Martin Ženíšek, manažer pro rozvoj služeb společnosti LINET.

Francouzský kontrakt není v segmentu pronájmů vybavení jediným, který LINET letos uzavřel. V první polovině tohoto roku společnost vyhrála například také v tendru na renting aktivních antidekubitních matrací pro skupinu devíti zdravotnických zařízení v anglickém Bristolu. Zakázka zahrnuje zhruba 280 aktivních vzduchových antidekubitních matrací, které LINET bude dodávat po dobu dvou let. První dodávky začaly už koncem března a hodnota kontraktu přesahuje 27,5 milion korun. Jde o tzv. fully managed typ spolupráce. Ten spočívá v tom, že zákazník pouze objedná dodání matrace pro konkrétního pacienta a po ukončení léčby objedná stažení produktu.



Mezinárodní den Stop dekubitům

bude 20. listopadu 2014.

Podpořte ho s námi!

Stop dekubitům

Dekubity představují problém, který se navzdory neustálému pokroku v medicíně dosud nepodařilo vymýtit. A ohrožuje prakticky všechny pacienty – mladé, starší, dokonce i dětské, krátkodobě i dlouhodobě upoutané na lůžko.

Jako neúčinnější zbraň je považována prevence, s tou je ale spojena řada komplikací. Ne vždy je dostatek kvalitního a vzdělaného personálu nebo chybí nezbytné moderní vybavení. Navíc v českém prostředí nejsou k dispozici centrální data, na základě jejichž vyhodnocení by bylo možné neustále aktualizovat standardy pro ošetrovatelskou péči zaměřené na prevenci dekubitů.

PLÍŽIVÉ NEBEZPEČÍ

Dekubitus (proleženina) je poškození kůže nebo tkáně kůže, které vzniká působením tlaku nebo třecích sil. Míra poškození kůže se klasifikuje několika stupni od vcelku nenápadného zarudnutí kůže až po těžké odumírání vrstev tkáně postihující svaly, šlachy a kosti. Kromě bolestivého utrpení, které taková rána představuje pro pacienta, je dekubitus otevřenou branou pro infekce. Ty mohou být příčinou i úmrtí pacienta, který rozvinutým dekubitem trpí. Pro sestry znamená výskyt dekubitu vyšší nasazení péče, ale také stresovou záležitost, dekubitus je totiž považován za selhání ošetrovatelské péče. Na nezanedbatelném místě stojí také ekonomická čísla, léčba dekubitu totiž nejen prodlužuje hospitalizaci, ale vyžaduje i nasazení léčebných prostředků, například účinných, ale finančně náročných krycích materiálů. Evropský panel pro prevenci dekubitů (EPUAP) pro názornost vypočetl, co všechno je možné pořídít za náklady na léčbu 10 dekubitů – 10 peacemakerů, 6 kolenních náhrad nebo 5 operací bypassů.

PROČ JE DŮLEŽITÝ MONITORING?

V České republice je situace v oblasti dekubitů a jejich prevence poměrně optimistická. Výskyt dekubitů ve zdravotnických zařízeních se podle prevalenčního šetření od roku 2009 do října 2013 pohybuje od 5,46% do 3,49%. Stále ale zbývá velký prostor, na kterém je potřeba pracovat. „Sledování výskytu dekubitů je jedním z hlavních ukazatelů kvality ošetrovatelské péče. Aplikací preventivních opatření se snižuje riziko vzniku dekubitů, a tím se zvyšuje bezpečí, spokojenost a kvalita života pacientů. Vznik dekubitů vždy znamená komplikaci v průběhu hospitalizace a její prodloužování,“ říká Kateřina Ternbachová, koordinátorka Národního referenčního centra (NRC), které poskytuje metodiku a koordinuje monitoring dekubitů na národní úrovni.

Jednou ze zbraní, která pomáhá v dlouhodobém úsilí, je právě monitoring a následné přijímání opatření, která z aktuálních vyhodnocených dat vyplynou. Dobrou zprávou je, že ve většině nemocnic systém sledování mají nastaven a je používán. Bohužel jsou ale metodiky monitoringu různé, nedají se sloučit a výsledky porovnávat. Od roku 2010 začalo pracovat Národní referenční centrum (NRC), které poskytuje metodiku a koordinuje šetření výskytu dekubitů na národní úrovni. Do tohoto celostátního projektu je ale momentálně zapojeno 10 nemocnic v celé ČR. „Snažíme se o to, abychom dokázali sběr dat z jednotlivých sledovacích systémů sjednotit. Máme podporu ministerstva a věříme, že se to podaří,“ poznamenala Nina Müllerová, vedoucí Centra řízení kvality ve Fakultní nemocnici Plzeň, které je jednou z oněch deseti nemocnic zapojených do národního monitorovacího systému.

Obecné standardy zaměřené na účinnou prevenci dekubitů, které by vznikly na základě dat z monitoringu, proto zatím neexistují, ale první vlaštovky se začínají objevovat. „V rámci projektu

LINET na Konferenci EPUAP 2014

Evropský panel pro prevenci dekubitů pořádá každoročně putovní konferenci. Letos se uskutečnila ve Švédsku. Účastníky hostila stockholmská univerzita v moderních konferenčních sálech Auly Magny zdejšího univerzitního kampusu. Společnost LINET pojala účast aktivně.

Pro hosty konference byl připraven nejen stánek s resuscitačním lůžkem Multicare v kombinaci s integrovanou aktivní matrací Symbioso 200 a akutní lůžko Multicare LE s aktivním an-

tidekubitním systémem Virtuoso. LINET uspořádal pro zájemce workshop vedený klinickou specialistkou Lorraine Demott. Lektorka poukázala na důležitost efektivního využívání dostupných možností moderních elektricky polohovatelných lůžek a matrací, ale také představila nového praktického pomocníka – podložky slide sheet. Tato podložka umožňuje pacienta přesunout z lůžka na lůžko nebo pomáhá při pohybu s pacientem na lůžku.

Národní sada ukazatelů zdravotních služeb zorganizovala NRC odborný panel pro konečné vyhodnocení klinicky specifických ukazatelů v oblasti ošetrovatelské péče. Panelu se účastnili experti daného klinického oboru a experti reprezentující stanovisko zdravotnického systému a plátců. Výstupem tohoto jednání jsou ukazatele doporučené pro ošetrovatelskou péči," uvedla příklad Kajetána Ternbachová.

MEZINÁRODNÍ PODPORA

V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie jsme na tom v Česku někde tak na půl cesty. Existují země z hlediska prevence dekubitů velmi vyspělé, například Velká Británie, ale i země, jako třeba Švédsko, kde zatím národní registr dekubitů nefunguje. Právě Švédsko bylo letos hostitelem výroční konference Evropského panelu pro prevenci dekubitů (EPUAP), která se uskutečnila na konci srpna ve Stockholmu na Univerzitě Karolinska. Jedním z hlavních cílů této odborné organizace je podpora prevence a léčby dekubitů v jednotlivých evropských zemích. Kromě odborných přednášek bylo letošní setkání příležitostí zveřejnit aktualizovanou směrnici pro prevenci a léčbu dekubitů, která už je v této době dostupná na webu EPUAP a chystá se i její české vydání. Na této aktualizaci směrnice pracovalo 27 skupin odborníků z Evropského panelu (EPUAP), Národního panelu (NPUAP) a Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Informace a fakta, na jejichž základě nová

doporučení vznikala, pocházejí z několika databází z různých zemí. Směrnice také obsahuje nové kapitoly zaměřené na prevenci dekubitů u specifické skupiny pacientů. Například u kriticky nemocných pacientů, pacientů na operačních sálech, na spinálních jednotkách, pacienty vyšších věkových skupin nebo naopak u pediatrických pacientů. Jedním z českých partnerů EPUAP je společnost LINET, která se konference aktivně zúčastnila a kromě informačního stánku uspořádala i workshop zaměřený na využívání nových technologií pro prevenci a podporu léčby dekubitů.

PREVENCE, PREVENCE A ZASE PREVENCE

Vedle podpory odborníků se EPUAP zaměřuje na šíření osvěty o prevenci dekubitů mezi širokou veřejností. O tom, že prevence dekubitů patří mezi základní lidská práva, se snaží informovat především během Dne Stop dekubitům, který letos připadne na 20. listopadu. Společnost LINET již tradičně během tohoto dne upozorňuje na problematiku dekubitů, letos bude aktivně spolupracovat s Fakultní nemocnicí v Plzni. Pro tento den bude připravena kampaň zaměřená jak na širokou veřejnost, tak na odborníky. Problém neexistující veřejné osvěty může být příčinou vysokého výskytu dekubitů v domácím prostředí. Podle údajů Národního referenčního centra je dekubitus zaznamenán až

u 30 % pacientů již na příjmu. Fakultní nemocnice Plzeň připraví během akce Stop dekubitům několik kontaktních míst, kde bude nejen zjišťovat prostřednictvím anket míru informovanosti veřejnosti, ale zájemce informovat o problematice dekubitů a k dispozici budou i ukázky pomůcek, které jsou pro rizikové pacienty vhodné a dostupné.

Druhá polovina dne bude věnována konferenci pro zdravotnické profesionály. Kromě odborných přednášek bude mít praktický rozměr díky spolupráci s několika partnerskými společnostmi v čele s LINETem. „Budeme se zaměřovat především na praktické ukázky využití dostupné techniky. Neustále se totiž setkáváme s tím, že personál nemá dostatek informací o možném využití antidekubitních efektů našich matrací i lůžek a v praxi je využívá řekněme tak z 20 %,“ vysvětlila Iveta Kinterová, produktová manažerka LINETu pro antidekubitní systémy. Přísun informací a soustavný důraz na jejich aplikaci vidí jako řešení i Nina Müllerová. „Trend výskytu dekubitů již delší dobu stagnuje. A příčiny zůstávají stejné. Cestu ven vidím v neustálém důrazu na to, aby prevence dekubitů patřila ke každodenní rutině. Není tajemství, že sestry jsou nesmírně zaměstnané, bojují s časem, ale my i takové situace musíme sledovat a poskytovat přísun nových informací, neustále je opakovat, nabízet vhodná řešení a dbát samozřejmě i na důslednou kontrolu,“ uzavřela.

Monitoring dekubitů napomáhá prevenci

Monitoring a jeho vyhodnocování pomáhá zavádět účinná preventivní opatření proti dekubitům. V Česku monitoring na národní úrovni zastřešuje Národní referenční centrum (NRC). Jeho koordinátorky, Kajetány Ternbachové, jsme se zeptali, jakým způsobem se dekubity sledují a proč je monitoring tak důležitý.



Jak se sleduje v Česku výskyt dekubitů?

Ve světě je sledování ukazatelů kvality ošetrovatelské péče běžné, v Česku se tento proces rozvíjí. Sledování výskytu dekubitů probíhá v nemocnicích v závislosti na individuálním uvážení ošetrovatelského managementu nebo na procesu akreditace, a obvykle není založené na jednotné metodice. Do našeho projektu

„Šetření dekubitů na národní úrovni“ je zapojeno deset nemocnic. Z údajů z těchto nemocnic se počítají referenční hodnoty, pomocí kterých mohou zapojené nemocnice sledovat, zda výskyt dekubitů je v jejich zařízení srovnatelný s národním průměrem nebo zda jsou na tom lépe či hůře. Celonárodní údaje neexistují.

Od kdy se dekubity v ČR monitorují?

První pokusy o zavedení národní metodiky sledování dekubitů se objevily v roce 2000, kdy proběhlo porovnání mezi čtyřmi fakultními nemocnicemi. Druhé porovnání, do něhož se zapojilo šest nemocnic, probíhalo v letech 2003 až 2005.

V roce 2008 byl zahájen projekt MZ ČR v rámci projektů kvality a bezpečí pacientů. Mezi hlavní výstupy tohoto projektu patří vypracování jednotné metodiky, která byla vydána ve Věstníku MZ ČR 6/2009 jako metodické doporučení.

V roce 2009 bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR převzetím projektu „Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetrovatelské péče na národní úrovni“ pověřeno Národní referenční centrum, které realizuje projekt jako „Šetření dekubitů na národní úrovni“ od začátku roku 2010.

Co tento monitoring nemocnicím přináší?

Zapojené nemocnice mohou sledovat, zda výskyt dekubitů je v jejich zařízení srovnatelný s národním průměrem nebo zda jsou na tom lépe či hůře. Každá nemocnice má přístup ke svým údajům a vypočítaným ukazatelům a současně se může anonymně porovnávat s ostatními nemocnicemi a referenčními hodnotami. Díky těmto informacím mohou dále zavádět potřebná preventivní opatření.

Již brzy na trhu:

variabilní matrace Air2Care



Aktivní matrace patří mezi nejefektivnější antidekubitní pomůcky. Společnost LINET ve spolupráci s britským vývojovým střediskem PSP Technologies neustále pracuje na inovacích, které možnosti aktivních matrací rozšiřují a činí je dostupnějšími.



KOMBINUJTE PODLE POTŘEBY

Značku LINET reprezentuje v oblasti antidekubitní péče celá řada aktivních matrací pracujících na různých principech a určených různým typům oddělení v nemocnicích a individuálním potřebám pacientů. Poslední novinkou je alternující matrace Air2Care určená především pro dlouhodobě ležící pacienty a klienty pečovatelských zařízení. Matrace Air2Care disponuje alternující te-

rapii a nabízí více variant využití, přičemž práce s touto matrací je velice jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Navíc poskytuje ležícím pacientům vysoký komfort.



ZÁKLADEM JE TERAPEUTICKÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA

Systém Air2Care nabízí několik variant matrací. Základem je vždy aktivní vzduchová vrstva, kte-



JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Nedílnou součástí matrace je kvalitní pružný potah z voděodolného a zároveň paropropustného materiálu, který pomáhá utvářet optimální hygienické prostředí pro ležícího pacienta či klienta pečovatelských zařízení. Potah je opatřen 360° zipem usnadňujícím údržbu a čištění matrace.

Ovládání systému je intuitivní a přehledné, stejně jako rychlé a snadné připojení/odpojení kompresoru. Pro usnadnění manipulace s pacientem na lůžku je k dispozici tzv. transportní režim, kdy vzduch zůstává v systému i po odpojení z elektrické sítě či z kompresoru.



KOMFORTNÍ LEŽENÍ

Konstrukce vzduchové vrstvy je pevná, takže zabraňuje nepříjemnému „propadání“ ležícího člověka. Vzduchový kompresor má velice tichý provoz, který neruší, což je zvlášť důležité u lidí, kteří tráví na lůžku 24 hodin denně po delší období.

Aktivní antidekubitní systémy LINET

VIRTUOSO

Aktivní antidekubitní systém Virtuoso má dvě alternující vzduchové vrstvy a je založen na alternování 3 spojených cel, které umožňují odlehčení a redukci tlaku na nulovou hodnotu na celém těle pacienta každých 7,5 minuty.



PRECIOSO

Alternující antidekubitní matrace s jednou vzduchovou vrstvou využívá střídavého nafukování 3 cel v intervalu 7,5 minuty. Matraci je možné použít samostatně nebo v kombinaci s pěnovou matrací.



SYMBIOSO

Mimořádně tichá a účinná matrace Symbioso integrovaná do lůžka Multicare pracuje na duálním principu stále udržovaného tlaku a vhodného mikroklimatu. Zvyšuje tak prevenci dekubitů vzniklých vlivem tlaku a vlhkosti.




Tipy pro prevenci dekubitů



POLOHOVÁNÍ

Pravidelné polohování pacienta patří k základním preventivním opatřením proti dekubitům. V určitých časových intervalech je vhodné měnit polohu pacienta, je také vhodné dodržovat postup záda – pravý bok, poté záda – levý bok. Běžně se u imobilních pacientů doporučuje po 2 hodinách během dne, v noci je interval delší, až čtyřhodinový.

Polohování patří k fyzicky náročným úkonům. Správným využíváním dostupných technologií můžete fyzickou námahu výrazně snížit.

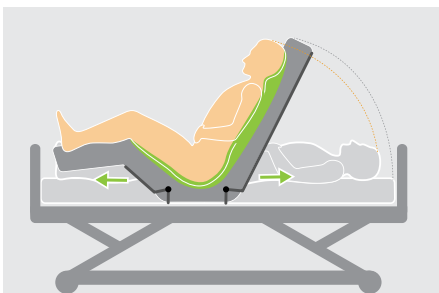

ErgoFrame® rozšiřuje ložnou plochu v rizikových partiích

POLOHOVÁNÍ S LATERÁLNÍM NÁKLONEM

Laterální náklon ložné plochy lůžka pomáhá pacienta přesunout z polohy na zádech do polohy na bok s vynaložením minimální fyzické námahy. Rotace ložné plochy pacienta doslova přetočí sama, sestra pouze přidržuje pacienta a jistí ho. Podporu a pohodlí pro pacienta zajistí speciální polštáře, které jsou vloženy mezi pacienta a postranici lůžka.

Funkcí laterální náklonu jsou vybavena lůžka Latera a Multicare. Bezpečnost pacienta jistí bezpečné a robustní postranice, jejichž konstrukce je připravena na vysokou zátěž. Rotace ložné plochy do stran se spouští a ovládá pomocí nožního ovladače, takže sestra má volné ruce a může se plně věnovat práci s pacientem.

ANTIDEKUBITNÍ EFEKT ERGOFRAME®

Konstrukční mechanismus rozšiřuje úsek ložné plochy v pánevní oblasti až o 16 cm, a tím odstraňuje nadměrný tlak v těchto partiích. Rozšířená pánevní oblast také zvyšuje komfort pacienta na lůžku.

Anketa

1. Jakou prioritu má pro vás prevence dekubitů?
2. Co považujete za nejdůležitější vybavení pro prevenci dekubitů?

Nina Müllerová,
vedoucí Centra řízení kvality
FN Plzeň



1. Dekubity a prevence mají velmi vysokou prioritu. Je to problém, který sužuje samozřejmě postiženého pacienta, ale zároveň stresuje i sestry. Považují to za selhání péče, mnohdy ne svojí vlastní. S léčbou dekubitů jsou spojeny další činnosti, které musejí sestry provádět a samozřejmě i nemalé náklady. S prevencí začínáme už při příjmu, kdy pacienta vyšetřujeme a vyhodnocujeme riziko možného vzniku dekubitů.

2. Nejdůležitější pro prevenci je vhodná matrace. To je základ. Na dalším místě jsou polohovací pomůcky, například polohovací klíny s dezinfikovatelným povrchem, polohovací polštáře nebo pěnové botičky pro ochranu pat. Důležité je i kvalitní polohovatelné lůžko. Vedle všech těchto pomůcek ale stojí znalosti, informovanost a dovednosti sester, týkající se nejen vyhodnocování rizika a preventivních opatření, ale také informovanosti o vhodných pomůckách, které mají k dispozici. V neposlední řadě je to i osobní postoj a empatie k problémům pacienta.

Petra Tůmová,
staniční sestra KARIMRES
ÚVN Vojenské fakultní
nemocnice Praha



1. Prioritu mají dekubity velkou, nejdůležitější je samozřejmě prevence.

2. Za nejdůležitější vybavení považuji kvalitní lůžko s antidekubitní matrací. Pak polohovací antidekubitní pomůcky a také používáme preventivní pěnové krytí. Nezbytné je polohování, které provádíme po třech hodinách nebo i častěji, pokud to stav pacienta dovolí.

Zároveň se díky ErgoFrame® snižuje tření mezi matrací a pokožkou pacienta v rizikových oblastech zad a lopatek. Mechanismus ErgoFrame® tak vytváří optimální podmínky pro zcela ergonomické polohování pacientů a potlačuje jeho negativní vlivy.



Nemocnice, které na Vás záleží

V roce 2009 získali ve Strakonících titul Nemocnice roku a přední příčky v žebříčku HealthCare Institutu, které vychází nejen z hodnocení pacientů a zaměstnanců, ale také ekonomické bilance nemocnice, obsazují dodnes.

Strakonická nemocnice sice není tak úplně na kraji města, ale vedle rušné křižovatky působí se vzrostlými stromy spíše jako park. K nemocnici na kraji města by se však dala přirovnat i svou velikostí a spádovou oblastí, jen k místním vyhlášeným oborům nepatří jenom ortopedie, ale oční lékařství a gastroenterologie. „Ročně ošetříme zhruba 140 000 pacientů a provedeme okolo 5 000 operací, zaměstnáváme 540 lidí, z toho 100 lékařů. Pacienti k nám míří převážně z bývalého strakonického okresu, ale v některých specializacích tuto hranici překračujeme,“ představuje svou nemocnici ředitel MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

VŠECHNY OPERAČNÍ SÁLY POHROMADĚ

„Pavilonové uspořádání je sice hezké, ale má i své nevýhody. Při modernizaci se proto spíše snažíme slučovat jednotlivé medicínské obory tak, abychom nemuseli pacienty příliš často převážet a mohli jim veškerou potřebnou péči poskytnout na jednom místě,“ pokračuje Tomáš Fiala

v popisu změn, kterými nemocnice v posledních letech prošla. Posledním počinem v plánu rekonstrukce bylo dokončení náročné přestavby chirurgického oddělení a přemístění všech operačních sálů do jedné budovy – operačního centra, které je koncipováno tak, aby posloužilo pacientům jak chirurgického, tak i gynekologicko-porodnického oddělení. Během rekonstrukce nově také vznikla sterilní chodba, aby bylo možné sály zásobovat materiálem.

Nemocnice má rovněž nové vybavení, mimo jiné také 70 lůžek LINET Eleganza 1, která jsou umístěna na odděleních gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurologie a také 13 lůžek Eleganza 3XC, určených pro akutní péči, která najdeme na ARO a JIP. Co rozhodlo o tom, že lůžka budou právě od LINETu? „Jednoznačně cena“, odpovídá bez zaváhání Tomáš Fiala. „A zkušenosti. Lůžka LINET jsme už dříve měli a vždy jsme s nimi byli spokojeni,“ doplňuje slova ředitele hlavní sestra strakonické nemocnice, magistra Marie Janoušková.

LŮŽKA LINET ŠETŘÍ SESTRÍČKÁM PRÁCI. A ŽÁDA

„Změn ve stavebním uspořádání se po návratu do rozšířených prostor dočkalo také ARO, jehož součástí je nyní také multioborová jednotka intenzivní péče pro operované a ostatní pacienty chirurgických oborů vyžadujících intenzivní péči,“ připomíná Tomáš Fiala. Nově je oddělení vybaveno lůžky LINET Eleganza 3XC a primář Marek Zbořil na nich nejvíce oceňuje jejich bezproblémové fungování. „Za toho půl roku, co tady lůžka máme, jsme zatím nepotřebovali žádnou opravu, to vidím jako největší plus. Ovládání postelí je intuitivní, pro mne je nejdůležitější funkce CPR, takzvaná resuscitační poloha, při které se postel vodorovně srovná a sjede dolů, abychom mohli zahájit oživování,“ vysvětluje a odkazuje na sestry, které s lůžky manipulují o poznání častěji.

Sestřičky si lůžka také chválí. Na ARO jsou poměrně úzké chodby a překážky v podobě



Rekonstrukce strakonické nemocnice zvýšila kvalitu péče



umyvadel, přesto jedna ze sester s lůžkem obratně manipuluje a zatáčku bez škobrtnutí vytočí. Na ostatních odděleních, vybavených lůžky Eleganza 1, rovněž panuje spokojenost, a to jak mezi sestrami, tak mezi pacienty – ti, kteří už mají po operaci a je jim lépe, usmívají se a vesele fotí s ovládním lůžka, které mají k dispozici a prý s oblibou využívají. Sestry si zase chválí výškovou polohovatelnost, která jim významně usnadňuje práci při převlékání lůžek a pak v kombinaci s polohováním zádového dílu pomáhá s mobilizací pacientů.

ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU

Kam vede schodiště z prvního patra pavilonu operačních sálů, napovídá velký obrázek čápa na stěně. „Chtěli jsme, aby byl barevnější nebo měl alespoň červenou čepičku,“ směje se hlavní sestra Marie Janoušková. Pan architekt si ovšem do své koncepce mluvit nenechal, čáp je vyveden v chladném odstínu šedomodré, aby barevně za-

padl do celkového ladění společných interiérů nemocnice. Čáp sice čepičku nemá, zato nese v zobáku miminko a my směřujeme na gynekologicko-porodnické oddělení.

Zdejší porodnice patří k těm v jihočeském kraji vyhlášeným, jezdí sem rodit maminky až ze Sušice. Titul Baby friendly hospital získala nemocnice zaslouženě. Oddělení gynekologie a šestinedělí je součástí nového pavilonu a nové porodní pokoje umožňují zůstat po celou dobu porodu, před ním i po něm na jednom místě, maminky tedy nemusí přecházet na porodní sál. Oddělení šestinedělí zdobí veselé obrazy věnované nadačním fondem herečky Zdeny Žádníkové Volencové a celkově tu panuje příjemná „nenemocniční“ atmosféra. Třeba i díky tomu, že maminky mohou využívat prostor malé útulné jídelny, a když se tu ráno s miminko v postýlkách MiMi také od společnosti LINET sejdou u snídaně, bývá tu prý celkem živo.

FRIENDLY NEJEN K MIMINKŮM

Přístup sester k novopečeným maminkám je vstřícný. „Sice stále dodržujeme systém předávání směn brzy ráno, daný obecně chodem nemocnice,“ vysvětluje vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Miloslava Bláhová, „ale na měření teploty rozhodně maminky nebudíme, používáme bezkontaktní teploměr. Personál má přehled, která maminka se v noci nevyspala, a podle toho volí individuální přístup,“ dodává. Celkově působí oddělení šestinedělí rodinně – většinu maminek znají sestřičky již z předporodních kurzů, případně mají nějakého společného příbuzného či známého, což patří k (ne)výhodám menšího města.

Pokoje jsou dvoulůžkové, samozřejmostí je sociální zařízení, polohovatelná elektrická lůžka LINET Eleganza 1 a postýlky pro miminka MiMi. Dvoudenní Davídek se v jedné takové postýlce právě „opaluje“ u okna, pozoruje krásné stromy v parku a je mu ještě celkem jedno, že některé z nich patří k významným dendrologickým exponátům. Jeho mamince dělá trochu starosti, že má lehkou novorozeneckou žloutenku a tak využívá toho, že je postýlka z průhledného plastu a dobře propouští světlo. Chtěla by jít zítřka domů, kde na ně čeká táta a starší sourozenec.

Je však velmi pravděpodobné, že Davídek není ve strakonické nemocnici naposledy. A ani desetiletý Kuba, kterého právě jeho máma odvádí parkem se zafačovanou hlavou: „Je nejmladší ze čtyř podobně aktivních kluků, takže se sem podíváme několikrát do roka. V „oblíbené“ máme zvláště oddělení chirurgie a šití,“ říká s úsměvem. Za tu dobu, co sem jezdíme, se nemocnice stále modernizuje a mění, ale lidský přístup zůstává,“ dodává. Heslo, které strakonická nemocnice používá a které tvoří i titulky tohoto článku, tedy „Nemocnice, které na Vás záleží“, evidentně není prázdňá fráze.

Lůžko Eleganza 3XC pro akutní péči na odděleních ARO a JIP



Lůžko Eleganza 3XC je svým designem a funkcemi ušité na míru vysokým nárokům intenzivní péče – nabízí soubor funkcí, který pomáhá nemocničnímu personálu zachraňovat životy pacientů v kritickém stavu. Eleganza 3XC disponuje řadou unikátních progresivních vlastností:

1. Toto lůžko podporuje zajištění vitálních funkcí pacienta – nabízí polohu „kardiacké křeslo“, která pomáhá předcházet plicním komplikacím, a polohování ložné plochy Ergoframe®, které činnost plic déle optimalizuje. Komfort a bezpečnost pacienta dále zvyšuje možnost rentgenování přímo na lůžku a integrované váhy.
2. Unikátní je rovněž systém bezpečnosti pacienta, zajištěný několika sofistikovanými prvky, konkrétně inovativním řešením postranic s možností doplnění o Protector, který poskytuje maximální ochranu na základě individuálních potřeb pacientů, dále pak automatickou brzdu I-Brake a multizónový Bed exit alarm, který upozorní personál na skutečnost, že pacient opustil lůžko.
3. Systém polohování Ergoframe® pak rozšiřuje prostor v bederních partiích a výrazně snižuje tlak na pokožku, což v kombinaci s aktivními matracemi Virtuoso či Precioso vede k významnému snížení rizika vzniku proleženin.



Postýlky MiMi na oddělení šestinedělí



Pacienti s oblibou využívají ovládání Eleganzy 1

Bariatrické lůžko

Image 3



Problémy s vysokou hmotností pacientů se vyskytují v nemocnici stále častěji. Stále se zvyšuje počet lidí trpících touto civilizační chorobou, která s sebou přináší velké množství zdravotních komplikací.

Sproblematikou zajištění kvalitní a bezpečné péče o pacienty s velkou hmotností se potýká stále více zdravotnických zařízení. Nutností je totiž vyšší počet personálu a také speciální vybavení. Běžné výrobky, například lůžka se standardním bezpečným pracovním zatížením 200 kg, totiž nezajišťují funkčnost a především bezpečnost. V této situaci přichází na trh nové bariatrické lůžko Image 3, které reaguje na aktuální potřeby zdravotníků i na zvyšující se nadváhu populace.

Bariatrické lůžko Image 3 nabízí bezpečné a pohodlné ležení obézním pacientům. Lůžko je univerzální, usnadní péči o tyto pacienty v širokém spektru nemocničních specializací. Nejvýraznějším rysem je vysoké bezpečné pracovní zatížení lůžka, dosahující až 320 kg, které zajišťuje bezpečnost a plnou funkčnost při péči o pacienty s nadměrnou hmotností. Image 3 však má další funkce zaměřené na pacienty trpící obezitou, ale také na ulehčení práce personálu, který o ně pečuje.

BEZPEČNOST ZE VŠECH ÚHLŮ

Klíčovým bezpečnostním prvkem lůžka jsou jednoduché sklopné postranice. Pevné a robustní postranice mají vysokou nosnost a jsou zajištěny proti nechtěnému spuštění dvoukrokovým mechanismem. Personál s postranicemi manipuluje velice snadno a ergonomicky, ovládání je umístěné na horní hraně postranic.

Postranici je možné vybavit Extenderem, který ji zvýší až o 10 cm. Toto opatření je vhodné zejména při využití vyšších aktivních matrací. Další přídatnou technologií je Protector, část postranic chrání pacienty i v nožní části lůžka. Pak je k dispozici ochrana po celé délce ložné plochy, která zabraňuje například zmateným pacientům opustit lůžko a slouží jako preventivní opatření.

Bezpečnostní parametry zvyšuje také alarm nezabrzdného lůžka. Tato funkce automaticky upozorňuje na nebezpečnou situaci, takže personál může reagovat: Zabrání tak možnému pádu pacienta, pokud by se chtěl o lůžko opřít při vstávání nebo uléhání.

Velkou výhodou lůžka je nejnižší poloha lůžka 28 cm nad podlahou. Díky speciální konstrukci dosáhne lůžko unikátní nízké polohy, kterou je možné použít jako preventivní opatření proti pádu během spánku pacientů.

PREVENCE DEKUBITŮ A KOMFORT

Obezita je velmi rizikovým faktorem pro vznik dekubitů. Obézní pacient působí na kůži silnějším tlakem, nebezpečné jsou také záhyby kůže. Problémem je i manipulace s těžkými obézními lidmi zejména při imobilitě nemocných trpících obezitou. Jejich polohování je limitováno fyzic-

Obezita v ČR a ve světě

Většina lidí považuje za nejlustší národ Američany, podle posledních statistik je ale předběhli jejich jižní sousedé Mexičani. Ani Češi ale nemohou toto soupeření o čelo žebříčku sledovat bez zájmu, Česká republika se dostala na 9. místo celosvětově. Ještě smutnějším faktem je, že obezita má devastující vliv na zdraví. Chronická onemocnění s ní spojená má celosvětově na kontě 60 % úmrtí.

Žebříček největších tloušťků podle OSN

1. Mexiko – 32,8 procenta
2. USA – 31,8 procenta
3. Sýrie – 31,6 procenta
4. Venezuela, Libye – 30,8 procenta
5. Trinidad & Tobago – 30 procent
6. Vanuatu – 29,8 procenta
7. Irák, Argentina – 29,4 procenta
8. Turecko – 29,3 procenta
9. Česká republika – 28,7 procenta
10. Libanon – 28,2 procenta
11. Nový Zéland, Slovinsko – 27 procent
12. El Salvador – 26,9 procenta
13. Malta – 26,6 procenta
14. Panama, Antigua – 25,8 procenta
15. Izrael – 25,5 procenta
16. Austrálie, Svätý Vincent – 25,1 procenta
17. Dominikánská republika – 25 procent
18. Spojené království, Rusko – 24,9 procenta
19. Maďarsko – 24,8 procenta

kou silou a počtem personálu a také vhodným vybavením. Lůžko Image 3 má integrovaný systém Ergoframe® v ložné ploše, díky němu a v kombinaci s kvalitní péčí i vhodnou matrací působí preventivně proti vzniku nebezpečných proleženin.

Díky systému Ergoframe® dochází ke zvětšení prostoru mezi zádovou a stehenní částí ložné plochy, a to až o 16 cm. Tím se snižuje tlak na vysoce rizikovou sakrální oblast. Zároveň Ergoframe® posunuje při zvedání zádového dílu ložnou plochu nahoru, takže pacient má stále pevnou oporu hlavy a snižuje se tím také působení nebezpečných třecích sil, zejména v oblasti lopatek.

VÝRAZNÝ DESIGN PRO KAŽDODENNÍ PÉČI

Vzhled lůžka Image 3 navrhl renomovaný designér a dlouholetý spolupracovník LINETU Jiří Španihel. Barevné dekory čel a použité materiály dodávají lůžku důvěryhodnost.

Půjčovna postýlky MiMi

Pomoc maminkám a bezpečí pro miminka

Novorozeneckou postýlku MiMi, která slouží v mnoha porodnicích v ČR i v zahraničí, si mohou české maminky zapůjčit i na doma. Profesionální výrobek zapůjčuje Půjčovna první postýlky MiMi v 15 pobočkách, rozmístěných po celé České republice. Pronájem je velice praktický. Když miminko cca po 3 měsících z postýlky vyrostе, jednoduše ji rodiče vrátí do půjčovny.



„Postýlku MiMi doporučuji nejen pro období šestinedělí,“ říká Markéta Mičková, dětská sestra a laktiční poradkyně. „Tato postýlka je nesmírně praktická. Kromě toho, že je mobilní, takže si s ní maminka může kamkoliv zajet, a výškově nastavitelná, oceňuji především bezpečnost a stabilitu. Polohovatelný sklon postýlky je velmi důležitý pro miminka, která ublíkávají po jídle nebo mají zhoršenou průchodnost dýchacích cest při onemocnění,“ vypočítává hlavní výhody postýlky Markéta Mičková.

BEZPEČNOST A ZDRAVÝ VÝVOJ MIMINKA

Bezpečnost miminka i v domácím prostředí je důležitou okolností pro volbu MiMi postýlky. Možností, kam pokládat miminko doma v noci i přes den, je celá řada, ale ne všechny splňují zdravotní a bezpečnostní nároky. Novorozené miminko je velice křehké a navíc je nutné dbát na správný vývoj páteře. Dětské sestry i lékaři se často setkávají s vadami páteře, které mají začátek v dlouhém pobytu novorozenců a kojenců v tak oblíbených autosedačkách nebo v křesilkách.

Postýlka MiMi má ložnou plochu rovnou a je vybavená speciální omyvatelnou a paropropustnou matrací. Pod matrací je možné vložit monitor dechu a ovládání se jednoduše upevňuje na kon-

strukci postýlky. V této kombinaci je miminko maximálně zajištěné proti nenadálým událostem. Vanička, v níž miminko leží, je akorát tak veliká pro novorozence a vejdou se do ní polohovací válečky pro správné udržení polohy hlavičky a těla. Díky bezpečnostním funkcím doporučujeme profesionální postýlku nejen nedonošeným dětem a víceraťům s menší porodní váhou, ale všem novorozencům.

FOTOTERAPIE PRO KAŽDÉHO

Neocenitelnou pomoc poskytuje postýlka MiMi při fototerapii miminek s novorozeneckou

žloutenkou. Tou trpí 50 až 60 % všech novorozenců a ve většině případů není zapotřebí speciální léčby. Lékaři doporučují kromě dostatku teplotin také pobyt na neostřem denním světle. Postýlka MiMi je průhledná, takže umožňuje vystavit miminko světlu prakticky ze všech stran. Také si ji maminky mohou zavést k oknu a naklonit tak, aby světlo působilo co nejintenzivněji.



POSTÝLKA JE NA DOSAH

Půjčovna První postýlky MiMi má centrálu v sídle společnosti LINET ve Slaném, ale pobočky, které zápůjčky kompletně zprostředkují, jsou ve 14 dalších českých městech. 3 pobočky jsou umístěné přímo v porodnicích, a to v Nemocnici Karlovy Vary, Nemocnici Domažlice a Nemocnici Náchod.


Pronájem je snadný a především rychlý. Maminky tak mohou reagovat na nenadálé situace, například na nižší porodní váhu a komplikace s tím spojené při předčasném porodu nebo na komplikace s dýcháním, a rozhodnout se pro postýlku až v porodnici. Pronájem pracovníce půjčovny vyřizují většinou během 3 pracovních dnů, takže na drtivou většinu maminek, které pronájem objednávaly až po porodu, čeká postýlka MiMi při návratu domů.

Chcete maminkám poradit?

Na vyžádání zašleme informační materiály k postýlce a jejímu pronájmu. V případě zájmu také můžeme zajistit prezentaci postýlky na Vašich předporodních kurzech pro nastávající maminky. Prezentaci povede zkušená lektorka, dětská sestra Markéta Mičková, která zároveň přednáší kurzy Manipulace s miminkem.

Zavolejte na 312 576 400, 312 576 500 nebo napište na pronajem@linet.cz. Více informací o postýlce naleznete na stránce

www.prvnipostylka.cz nebo na facebooku www.facebook.com/PrvniPostylkami.

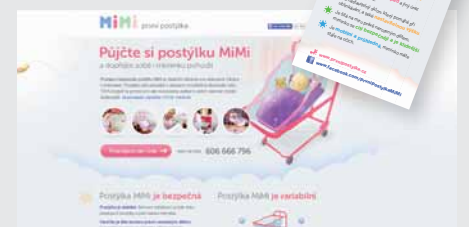



Časy sa menia, prestíž Vyšných Hágov pretrváva

Kam najlepšie umiestniť pľúcne sanatórium? Predsa do panenskej prírody, kde je prirodzenou súčasťou vysokohorský zdravý vzduch. Tak museli uvažovať československí štátni úradníci, keď v roku 1934 kládli základy dnešného Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudnej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Rozľahlá, veľkoryso poňatá liečebňa nielenže funguje dodnes, ale je stále prestížnym pracoviskom. Súčasné vedenie nemocnice neustále zvyšuje kvalitu starostlivosti a obnovuje vybavenie. Súčasťou tohto procesu bol aj nákup 19 lôžok CALMA, ako aj 3 lôžok ELEGANZA 2, nového typu lôžka spoločnosti LINET.

Celý areál je umiestnený v obci Vyšné Hágy. Nachádza sa v nadmorskej výške 1 124 metrov na úbočí impozantných tatranských štítov. Funkcionalistická hlavná budova ústavu je postavená v tvare zložitého písmena H, a pri pohľade z vtáčej perspektívy môže pripomínať lietadlo typu dvojplôšník. Mohutná stavba je obklopená parkom a množstvom ďalších architektonických prvkov – terasy, schodišťa, kryté promenády, ktorých úlohou bolo podporovať klimatoterapiu, kedysi dôležitý prvok pri liečbe tuberkulózy. Súčasťou areálu sú aj ďalšie menšie budovy, v ktorých je umiest-

nené technické zázemie – napríklad centrálna kotolňa alebo práčovňa.

ŠPIČKOVÉ PĽÚCNE PRACOVISKO NA ÚBOČÍ TATIER

Veľkorysý projekt vtedy Masarykovho sanatória bol na svoju dobu veľmi progresívny. A nielen vnútorným vybavením, ale aj konštrukciou a materiálmi, ktoré do dnešných dní odolávajú drsnej vysokohorskej klíme. Vysokú mieru životaschopnosti preukázala pamiatkovo chránená budova v roku 2004 pri tragickej veternej smršti, ktorá ni-

čivo postihla celú oblasť Vysokých Tatier. Ústav ani na okamih neprerušil prevádzku, dodávky energií i vody boli zaistené z vlastných záložných zdrojov.

Zároveň sa budova pýši vysokou urbanistickou i architektonickou kvalitou, dôkazom je zápis ústavu do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. Ale aby mohol ústav plniť bezo zvyšku svoju funkciu, bolo potrebné prevádzku modernizovať a tento proces pokračuje do dnešných dní. „Máme špičkovú techniku, sme skvele vybavení, obnova prechádza postupne celým ústavom,“ podotýka Jana Švecová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

A ústav drží krok nielen v oblasti architektúry, ale predovšetkým z hľadiska kvality starostlivosti. Od svojho založenia je absolútne špecifickým a unikátnym pracoviskom na liečbu pľúcnych chorôb, kedysi zameraný hlavne na diagnostiku a liečbu veľmi rozšírenej a hlavne nebezpečnej tuberkulózy. I keď sa výskyt tejto choroby podarilo minimalizovať a počet pacientov zostáva v posledných rokoch stabilný, až mierne klesajúci, ústav o pacientov núdzu nemá. Vďaka neustálemu rozvoju ďalších odborných pracovísk môže dnes poskytovať kvalitnú liečbu širokého spektra respi-



Vyšné Hágy sú prvým zariadením na Slovensku ktoré má nové lôžko Eleganza 2 k dispozícii

račných chorôb, najmä tých nádorových. Je tu tiež veľmi rozvinutá diagnostika pľúcnych chorôb, zahŕňajúca invazívne (operatívne) i neinvazívne metódy.

Celkovo má nemocnica 344 lôžok, pričom dlhodobou ubúda lôžok následnej (dlhodobej) starostlivosti v prospech akútnych lôžok.

ELEGANZA 2 V SLUŽBÁCH INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

Na oddelení JIS Centra hrudníkovej chirurgie s celkovou kapacitou 8 lôžok sa starajú o pacientov po výkone celej škály operácií – napríklad ide o diagnostické operácie pľúc, vážne operácie, pri ktorých sa odstraňujú pľúcne la-

loky, alebo po menších zákrokoch, ako je napríklad tracheostómia. Celá chirurgia je nanovo rekonštruovaná a vybavená najmodernejšou prístrojovou technikou. Unikátny je aj posledný prírastok – lôžko Eleganza 2. „Vyšné Hágy sú prvým zariadením na Slovensku a vlastne na území celej bývalej československej federácie, ktoré má nové lôžko k dispozícii,“ ríká Robert Klein, riaditeľ spoločnosti Artspect, ktorá lôžka dodala. Počas našej návštevy je lôžko prvýkrát v ostrej prevádzke. „Našťastie tu máme aj ďalšie lôžka značky LINET, takže i s novým výrobkom nemáme problém pracovať. Kvalitatívne je to zas posun ďalej. Nielenže vyzerajú perfektne na pohľad, ale hlavne sa s nimi veľmi ľahko manipuluje,“ hodnotí vedúca sestra Erika Tkáčiková. Veľmi oceňuje podsvietený uhlomer. „Kedysi sme mali problém s uvedením lôžka presne do roviny, polohu sme iba odhadovali, ale tu máme presný a prehľadný ukazovateľ,“ hovorí o ďalšej výraznej výhode nového lôžka. „Lôžko je navyše veľmi pohodlné, ovládače jednoduché, takže s nimi môže manipulovať i sám pacient, obzvlášť v prípadoch, keď je hospitalizovaný dlhodobo. Keby som bola pacient, chcela by som na takom lôžku ležať,“ usmieva sa Erika Tkáčiková.

Tunajší pracovníci na novom lôžku oceňujú i možnosť predĺženia lôžka, ktoré pomáha napríklad pri prevencii dekubitov v oblasti piat, ale aj ďalšie funkcie lôžka. Napríklad páku i tlačidlo resuscitačnej polohy (CRP) pri náhlych kolapsových stavoch tunajších pacientov. Veľmi využívaná je aj poloha kardiacké kreslo, ktorá uľahčuje dýchanie, nedochádza pri nej k stláčaniu vnútorných orgánov a navyše je pre pacienta maximálne komfortné.

Nové opatrovateľské zariadenia vyberajú kvalitu a LINET



Výstavba nových opatrovateľských zariadení prestáva byť na Slovensku ojedinelou udalosťou. Príbúdajú osvietení investori, ktorí rozširujú ponuku opatrovateľských služieb. Nové domovy spája dôraz na kvalitu služieb a vybavenia, čomu zodpovedá i voľba lôžok LINET.

Novostavba opatrovateľského domova vznikla v Nitre. Jeho prevádzkovateľom je tamojší biskupský úrad. V domove sa budú starať o kňazov seniorského veku, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Ku kvalite starostlivosti prispievajú aj moderné, elektricky polohovateľné lôžka LINET. Izby sú vybavené lôžkami Terno, Altura a tiež špeciálnymi lôžkami Latera s náklonom do strán, ktoré pomáhajú pri manipulácii s nepohyblivými klientmi.



Ďalší nový domov s názvom Rezidencia Nestor vznikol v obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín. Jeho investorom je súkromný subjekt a zariadenie je zamerané na klientelu nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Klientov bude lákať nielen nádherná príroda v bezprostrednom okolí, ale aj široká ponuka služieb, ich kvalita a špičkové vybavenie domova. Rezidencia Nestor okrem ubytovacích a opatrovateľských služieb ponúka aj rehabilitačné pobyty pre pacientov po operáciách alebo úrazoch a tiež odľahčovaciu službu v dennom stacionári. Interiéry izieb sú vybavené lôžkami LINET. Lôžka typu Movita a Sentida sa vyznačujú fúziou skvelého dizajnu a vysokej funkčnosti a bezpečnosti. Dodávateľom lôžok a interiérov do oboch domov je spoločnosť Basco SK.

Rodinný přístup a rovné příležitosti

Komunikace s kolegyněmi na rodičovské dovolené, firemní školka, zaměstnávání lidí starších 60 let či proces náboru nových zaměstnanců. Zejména tyto, ale i řadu dalších oblastí personální politiky společnosti LINET ocenil nedávný genderový audit provedený organizací Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství.

Audit měl za cíl prověřit, zda současné procesy personálního řízení ve firmě nejsou nastaveny diskriminačně a zda zajišťují podmínky pro rovnocenný přístup ke všem zaměstnancům. Závěrečná zpráva potvrdila férové pracovní prostředí, v němž zaměstnanci mají rovnocenný přístup k možnostem profesního rozvoje, vzdělávání, benefitům a dalším zdrojům.

„Výsledky auditu zařazují LINET mezi firmy, pro něž zaměstnanci a zaměstnankyně nejsou jen položkou v účetnictví. Naopak, personální politika společnosti jejich potřeby reflektuje a vychází jim v maximální možné míře vstříc,“ uvádí ve zprávě jedna z jejich autorek Petra Kubálková.




Red Dot pro Sentidu

Nové lůžko LINETu určené pro pečovatelský sektor získalo prestižní ocenění – jednak proslulou designérskou cenu Red Dot a také titul pro inovativní technologie Plus X.

Lůžka Sentida s označením 5 a 6 zabodovala u porotců spojením funkčnosti technologických inovací, elegancí a v neposlední řadě kvalitou provedení. Tato nová pečovatelská lůžka uvedla na trh společnost LINET Group SE vloni. Jejich nejvýraznějším rysem je nízká nástupní výška, inovativní konstrukce dělených postranic a podpora mobilizace. To vše v čistém, elegantním designu.

Prestižní mezinárodní ocenění Red Dot uděluje od roku 1955 Design Centrum Nordrhein Westfalen se sídlem v německém Essenu. V současné době rozděluje ceny v několika kategoriích, přičemž nejdůležitější zůstává cena pro produkty mimořádných designérských kvalit. LINET nezískal cenu poprvé, už v minulosti získal proslulý „červený puntík“ například stolek Stylo.

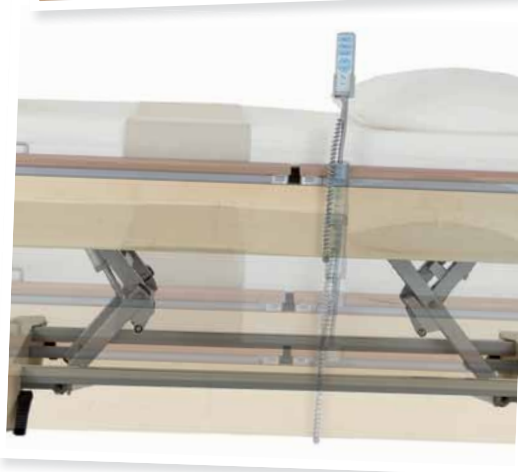

Bojujeme proti korupci

Společnost LINET podporuje protikorupční nevládní organizaci Transparency International (TI). Stala se VIP firemním členem Klubu TI, sdružujícího firmy a jednotlivce, kteří považují korupci za problém a chtějí podpořit boj Transparency International proti ní.

„LINET přispěl částkou 100 000 korun za účelem financování projektů organizace zaměřených na omezování korupce a zlepšování společenského klimatu v ČR,“ uvádí generální ředitel společnosti LINET Zbyněk Frolik. Organizace je financována zejména z grantů, které pocházejí ze státních i soukromých programů. Dalším zdrojem jak finančním, tak i morálním jsou podporovatelé a členové již zmíněného Klubu Transparency International.

Organizace Transparency International vznikla v roce 1993 v Německu a v současné době má více než 100 poboček po celém světě. Klub TI založila v roce 2011 a má už přes 160 individuálních a firemních členů. „Jsme velice rádi, že bude

LINET jeho součástí. Čím více lidí a společností podporuje naši nevládní organizaci, tím efektivněji můžeme vystupovat proti korupci a měnit naši zemi k lepšímu,“ dodává David Ondráčka, ředitel české pobočky.



Podpořili jsme odpoledne pro rodiny s dětmi

Půjčovna První postýlky MiMi, kterou provozuje společnost LINET, podpořila akci pro rodiny s dětmi nazvanou Honzík a Mařenka se vydávají do světa, kterou organizovalo sdružení Sít mateřských center. Zábavné odpoledne se odehrálo v parku na pražské Kampě jako součást celoroční kampaně Křídla a kořeny na podporu důležitosti rodiny, vztahů je-

jich členů i mezigeneračního propojení. Pro děti byla připravena různá stanoviště, kde plnily vědomostní, kreativní i pohybové úkoly. Všichni přichodí si také mohli užít divadlo, hudební vystoupení aj. Postýlka MiMi měla v parku svůj stánek, kde si zájemci mohli na místě postýlku prohlédnout i vyzkoušet a získat malý dárek.



Křížovka

Vyluštěte křížovku a můžete získat zajímavé ceny. Z Vašich správných odpovědí vylosujeme 10 úspěšných luštitelů, kterým zašleme některou z cen s motivem sestry LIN a doktora NETa. V tajence naleznete druhou část bonmotu spisovatelky Zdeňky Ortové. Ten začíná slovy: Hlavní rozdíl mezi erotickým a sci-fi filmem je ten, že průměrný divák nalezne ve své posteli spíš...

Vyluštěnou tajenku zasílejte do redakce na adresu neumannova@4jan.cz nejpozději do 28. listopadu. Do předmětu zprávy prosím napište „Křížovka LINET“ a v e-mailu kromě správného znění tajenky uveďte pozici a adresu svého zaměstnání. Výsledek losování sdělíme výhercům e-mailem. Přejeme příjemnou zábavu při luštění a štěstí při losování!

Znění tajenky z Komfortu 2/2014, která začínala slovy: „Člověk nutně potřebuje k životu dobrou postel a pár dobrých bot. Proč? Pokud **není v posteli, má na nohou boty – a naopak.**“

Výherci křížovky z Komfortu 2/2014:

Petra Krčmářová (Kroměříž), Věra Zudová (Jindřichův Hradec), Pavla Pokorná (Klimkovice), Hana Švíková (Prachatice), Jitka Dejmková (Pelhřimov), Alena Roháčková (Vraný), Petra Hrubá (Náchod), Kateřina Klegová (Krnov), Denisa Šrámková (Prostějov), Iveta Drastíková (Opava)

	OČI	3. DÍL TAJENKY	OBEC BARÁČNÍKŮ (ZKRATKA)	DĚJINA	SKOŘÁPKA MĚKKÝŠŮ		MUŽSKÉ JMÉNO	CITO- SLOVCE CHLADU	1. DÍL TAJENKY	STŘEŠNÍ LEPENKA	RUSKÉ VESNICE	PŘÍRODNÍ KAUČUK		URČITÍ V POŘADÍ	POLNÍ MÍRA	2. DÍL TAJENKY	ŠUPINY ODLÉTAJÍCÍ PŘI KOVÁNÍ
OPĚT						OBTISKO- VACÍ OBRAZEK							OPUŠTĚNÉ				
BUŘIČ						POTULNÝ LOVEC POPĚVEK							OBROTNÝ KOUSEK NOVINKA				
JAKMILE			SKLADIŠTĚ OBILÍ OKOUSÁ- VÁNÍ					TVRZENÍ (OCELI) PSACÍ POTŘEBA								KÓD MAURICIA RYBÁŘSKÉ ZARÍZENÍ	
SLOVENSKY „KDO“				TAMTA INICIÁLY TÓPFERA			POTÉ ŘÍMSKÝCH 51		FILIPÍNSKÁ SOPKA CIZÍ JEŠTĚR				ODDÍL VOJSKA DOMÁCKY ELIŠKA				
	SPISY PŘIPOJENÍ POZNÁMEK					BULHAR. PLATIDLO PEVNÝ JEZ					NECHUŤ POHÁD- KOVÁ POSTAVA						
OSTRÝ PRÍZVUK					HOUKAČKA HRÁČI KOŠÍKOVÉ							LISTNÁČ LENDLOVO JMÉNO					ALE
VYSTOUP- LÁ ČÁST OBLIČEJE				INICIÁLY PICASSA DÝMAT			ZBAVITÍ VOUSŮ NÁPOR CHOROBY								ŘÍM. 1005 NÁDOBA NA SMA- ZENÍ		
INICIÁLY HERCE VETČEHO			SRBSKÁ ŘEKA SLOVEN. „RÁDO“				JIŽNÍ PECKOVICE EVROPAN							CITOSL. KONEJŠENÍ KRTCI			
TRÝZNIVATI								SLOVENSKY „JEN“ DOMÁCKY IRENA					DOMÁCKY KATEŘINA FOSFID ARSENU				
PROVÁDĚTI ASANACI									MOŘSKÝ SAVEC UNITED NATIONS								
SLÍVAT PŘES SÍTO						KARÁT (ZASTAR.)							ZAÚPĚNÍ				POMŮČKA: AKUT, ANARNAK, ANOLI, ASP, BILA, KARUB, KREPA, MU, VRŠ
EXOTICKÁ ZVÍŘATA						ŽENSKÉ JMÉNO							PĚNIVÉ NÁPOJE				

Nejlepší nákup podzimu

Eleganza 1



Co všechno lze koupit za 40 tisíc? Tuto otázku řeší mnoho pečovatelských zařízení na konci kalendářního roku. LINET v této situaci přichází s nabídkou výhodného balíčku, který obsahuje unikátní lůžko Eleganza 1 a praktické příslušenství.

Kvalitou a rozsahem funkcí je nové lůžko Eleganza 1 v pečovatelském oboru unikátem. Mezi hlavní výhody plně elektricky polohovatelného lůžka patří funkce kardiacké křeslo, bezpečné a přitom neomezuující postranice a také podpora mobilizačních aktivit. To vše doprovází příjemný design, vysoký stupeň bezpečnostních parametrů a hlavně bezkonkurenční poměr kvalita/cena!

POHODLÍ NEJEN V KARDIACKÉM KŘESLE

Imobilní nebo částečně imobilní klienti tráví v lůžku většinu dne. O to důležitější je poskytnout jim komfort a pohodlné ležení. Eleganza 1 má dostatečně širokou ložnou plochu 90 cm, která nabízí pohodlný prostor i pro klienty s nadváhou. Unikátní a hlavně komfortní je poloha kardiacké křeslo. Pečovatelka ji nastaví stiskem jednoho tlačítka – napolohuje se zvednutý zádový díl a opora pro nohy. Tato pozice lůžka podporuje přirozenou plicní ventilaci a přispívá k podpoře kardiovaskulárního systému. Navíc je vysoce komfortní pro ležícího člověka, kterého tím pádem nemusí pečovat

vatelky složitě překládat do křesla. Klient může v této poloze sledovat televizi, jíst nebo pozorovat okolí a zapojovat se do dění kolem.

Vyšší stupeň pohodlí poskytuje ložná plocha s efektem Ergoframe®. Díky tomuto konstrukčnímu systému dochází při polohování k rozšíření ložné plochy v pánevní oblasti o 16 cm, což je komfortní, protože nedochází k utlačování vnitřních orgánů. Především ale působí tento efekt při prevenci dekubitů, protože se snižuje tlak na pokožku v této rizikové zóně. Právě v pánevní oblasti vzniká až 40 % dekubitů.

CHRÁNÍ, ALE NEOMEZUJÍ

Pády představují zejména pro klienty-seniory vážný problém, který má často fatální následky. Prevence je proto klíčová. Lůžko Eleganza 1 nabízí vysoký stupeň ochrany proti pádům – jednodílné sklopné postranice, které zajišťují bezpečný pobyt na lůžku. Postranice jsou pevné a ochraňují klienta před pádem z lůžka, přitom ho neomezuji. Pokud je potřeba poskytnout ochranu

po celé délce ložné plochy, je k dispozici Protector umístěný v nožní části lůžka. Postranice je možné doplnit výškovou extenzí při používání vysokých antidekubitních matrací. Postranice i celá konstrukce lůžka Eleganza 1 vyhovuje přísným parametrům ČSN EN 60601-2-52.

BEZPEČNÁ PODPORA POHYBU A AKTIVIT

Boj proti rezignaci a apatii patří ke každodennímu úsilí pracovníků v pečovatelské sféře. Lůžko Eleganza 1 podporuje procedury vstávání z lůžka ucelenou a propracovanou sadou prvků, které zvyšují bezpečnost mobilizačních aktivit. Ložná plocha může být vybavena integrovaným vstávacím madlem – pevnou a stabilní oporou při vstávání z lůžka. Zároveň se vstávacím madlem je k dispozici flexibilní výškové nastavení ložné plochy pro individuální výchozí polohu pro vstávání.

PRO KAŽDODENNÍ PÉČI

Lůžko Eleganza 1 s bezpečnou pracovní zátěží 250 kg disponuje funkcemi a vybavením, které výrazně ulehčují těžkou každodenní práci personálu. K základním benefitům patří ergonomické ovládání, snadná čistitelnost a řada chytrých detailů – integrovaná polička na lůžkoviny nebo lišta pro upevnění příslušenství.