

# ELEGANZA 2

# LINET



chytré lůžko pro akutní péči

# Eleganza 2

chytré lůžko pro akutní péči



The image shows a LINET Eleganza 2 hospital bed in a modern, brightly lit room. The bed is white with blue accents and is positioned in front of a large window offering a view of a city skyline at dusk. To the left of the bed is a light-colored armchair. The bed has a control panel on the side and is mounted on a wheeled base. The room has a clean, minimalist design with light-colored walls and a wooden cabinet in the background.

| Benefit                                  | Icon                                                                                  | Category   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| — Podpora mobilizace                     |    | Pacient    |
| — Pohodlí pro pacienta                   |                                                                                       |            |
| — Osvětlení s možností přepínání         |                                                                                       |            |
| — Vylepšená ergonomie                    |  | Personál   |
| — Automatické zastavení při úhlu 30°     |                                                                                       |            |
| — Koncepce snadného čištění              |                                                                                       |            |
| — Signalizace bezpečné polohy            |  | Management |
| — Rychlé a snadné kroky servisu a údržby |                                                                                       |            |
| — Příjemná ergonomie                     |                                                                                       |            |

# Podpora mobilizace



## VÝHODY PRO MOBILIZACI

Více místa pod postranicí ve spuštěné poloze zjednodušuje mobilizaci. Pacient totiž může umístit chodidla přímo pod své těžiště a tak dosáhnout optimálního postoje za vynaložení menší námahy.



## MOBI-LIFT®

Tlačítko MOBI-LIFT®, integrované do plastové postranice, zvedá ložnou plochu a umožňuje pohodlnou a bezpečnou kontrolu zdvihu během mobilizace. Pacienta doslova postaví na nohy.



## JEDINEČNÉ MADLO

Jedinečné madlo je dokonale tvarované pro pohodlnou a bezpečnou oporu během opouštění lůžka při všech polohách zadového dílu.



SAMOSTATNOST A RYCHLEJŠÍ MOBILIZACE



USNADNĚNÍ NAMÁHAVÉ PRÁCE



ÚSPORA NÁKLADŮ A SNÍŽENÍ RIZIKA PÁDŮ

# Atraktivní design



## POSTRANICE 4SAFE®

Postranice se spouští pomocí funkce SoftDrop, která k tlumení jejich pohybu využívá plynové odpružení.

1

**Soft Drop**  
FUNCTION

**FULLY**  
EN 60601-2-52

## SLOUPOVÁ KONSTRUKCE

Teleskopické sloupy tvoří podstatný prvek konstrukce lůžka Eleganza 2 a nabízejí mnoho výhod. Elektrické zdvihové jednotky zajišťují naprostou stabilitu a umožňují výškové nastavení lůžka.

2

## BAREVNÝ KONCEPT



BEZPEČNOST A POHODLÍ



UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÁ MANIPULACE A SNADNÉ ČISTĚNÍ



ŠPIČKOVÝ DESIGN JAKO STANDARD



# Maximální bezpečnost


Lůžko Eleganza 2 nabízí bezpečnost bez kompromisu. Postranice zaručují vysoký stupeň ochrany proti pádu a řada dalších bezpečnostních prvků propůjčuje lůžku Eleganza 2 nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti.

**SAFE Plus**  
**KONCEPCE**



## PATENTOVANÉ KAPALINOVÉ ÚHLOMĚRY

Přesně a přehledně ukazují náklon zádového dílu na postranicích v hlavové části a náklon ložné plochy na postranicích v nožní části.

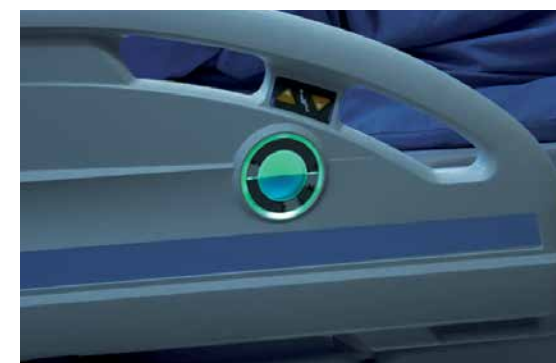

## SIGNALIZACE BEZPEČNÉ POLOHY

Úhlooměry lze volitelně vybavit bílým podsvícením, které změní barvu na zelenou, když je lůžko v bezpečné (nejnižší) poloze.



## NOČNÍ OSVĚTLENÍ

Podsvícení v podvozku usnadňuje pacientovi noční orientaci v místnosti.



**AlarmBRZDY** :))

## ALARM BRZDY

Lůžko automaticky upozorní zvukovým signálem na situaci, kdy zůstane nezabrzdnuté (pokud je zapojený napájecí kabel).

# Koncepce pokoje s lůžkem Eleganza 2

Celkové vybavení pokoje pro akutní péči nabízí inovaci, funkčnost, maximální bezpečnost a prvotřídní design. Přináší vysoký komfort pro pacienty, rodinné příslušníky i návštěvníky. Toto řešení podporuje po ergonomické stránce práci personálu a snižuje fyzickou námahu.



LŮŽKO

MATRACE

STOLEK K LŮŽKU

JÍDELNÍ STOLEK

SEDACÍ NÁBYTEK

# Komfort pro pacienta

## KOMFORT

Pohodlí zlepšuje pacientův duševní stav a urychluje jeho rekonvalescenci. Ložná plocha lůžka Eleganza 2 je upravena pro specifické podmínky zdravotnického zařízení, takže nabízí ten nejvyšší komfort.




## JUNIOR KIT

Lůžko Eleganza 2 lze nakonfigurovat pro pacienty o minimální výšce 125 cm na standardním oddělení.



## FLEXIBILNÍ NASTAVENÍ

Šířka ložné plochy nabízí vynikající komfort všem pacientům. Díky vestavěnému prodloužení lůžka v délce 32 cm se budou cítit velmi pohodlně i vyšší pacienti. Je-li potřeba lůžko zkrátit, je možné objednat menší rohové nárazníky a vnější délka bude činit pouhých 220 cm.

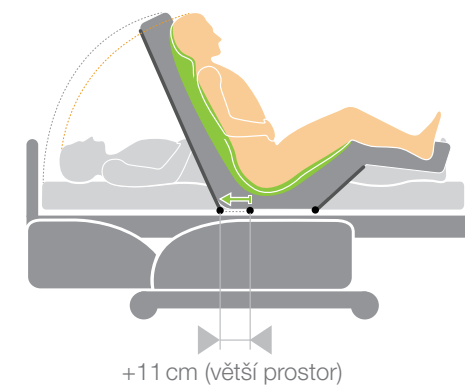

## AUTOREGRESE

Jednou z významných pomůcek v boji proti dekubitům je automatická regrese ložné plochy (zvětšující prostor v oblasti pánve dodatečným posunutím zádového dílu o 11 cm). Výsledkem je snížení tlaku a střížných sil, tedy parametrů významně přispívajících ke vzniku dekubitů.

# Pro snadnější péči



## 5. KOLEČKO

Díky 5. kolečku ve středu podvozku lze s lůžkem snáze manévrovat ve velmi úzkých chodbách.

## MADLA NA ČELE LŮŽKA

Speciální tvar madla umožňuje veškerému ošetrovatelskému personálu ergonomickou manipulaci s lůžkem. Možnost svislého úchopu madla je také ideální pro otáčení lůžka.



## SNADNÁ HYGIENA

Ložná plocha sestává z vyfukovaných plastových dílů a velmi snadno se čistí. Navíc ložná plocha napomáhá lepšímu provzdušnění matrace.



## RTG-TRANSPARENTNÍ ZÁDOVÝ DÍL

Toto provedení umožňuje rentgenování na lůžku.




## PŘIVOLÁNÍ SESTRY

Díky tlačítku pro přivolání sestry, zabudovanému do postranice, si pacient může okamžitě přivolat na pomoc ošetrovatele.



# Velmi snadné ovládání

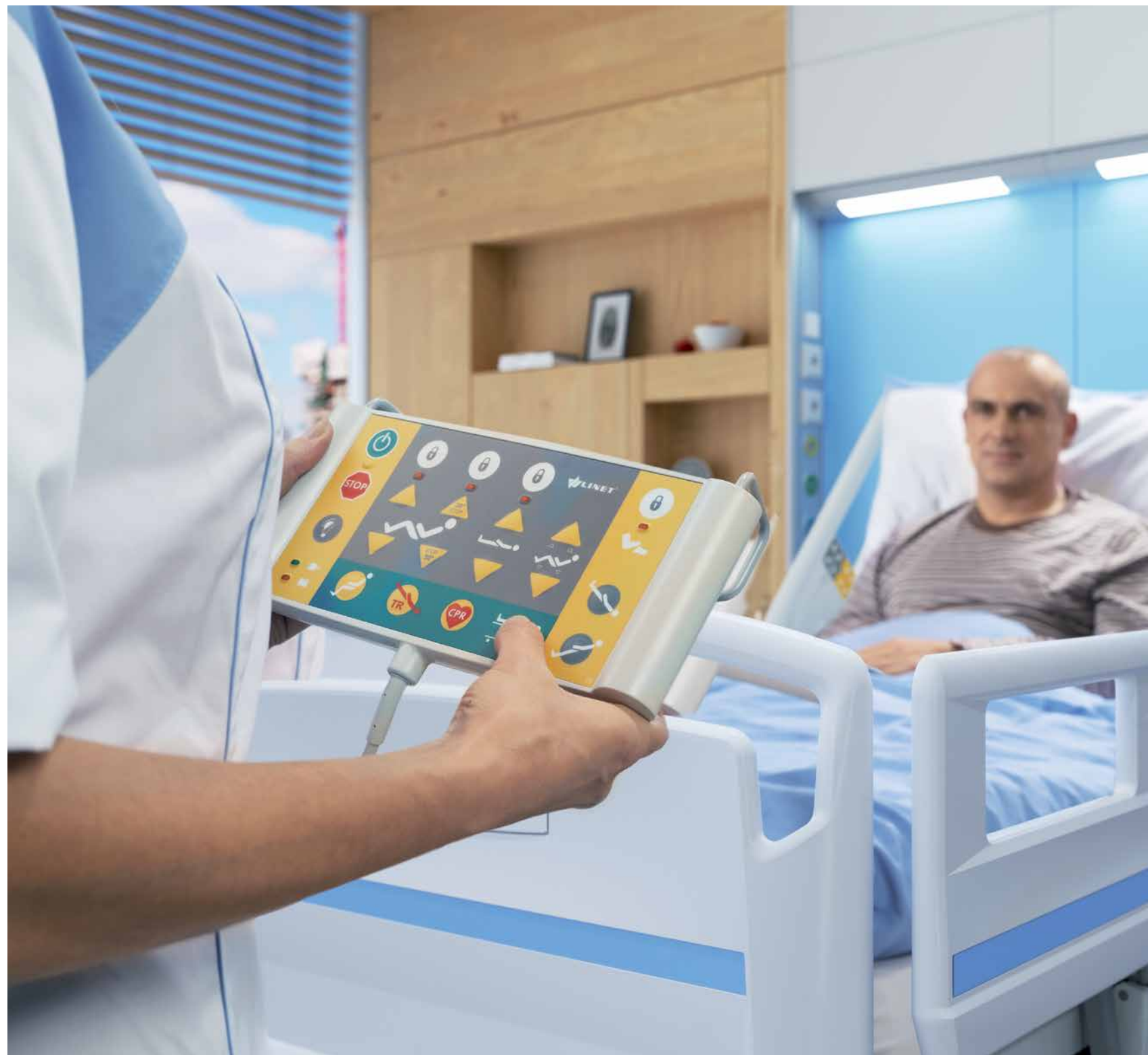

## ŘADA OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Ovládací prvky umožňují sestřám pracovat s lůžkem Eleganza 2 efektivně a ergonomicky. Přednastavené funkce jsou praktické a pohodlné pro sestru i pacienta.




### AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ ZÁDOVÉHO DÍLU NA 30°

Zádový díl se při polohování automaticky zastaví v nejčastěji používané poloze 30°.



### VYPNUTÍ PODSVÍČENÍ

Veškeré osvětlení lůžka – noční osvětlení a podsvícení úhloměrů, ručního ovladače a ovládacích prvků integrovaných v postranici – lze podle okolností vypnout.

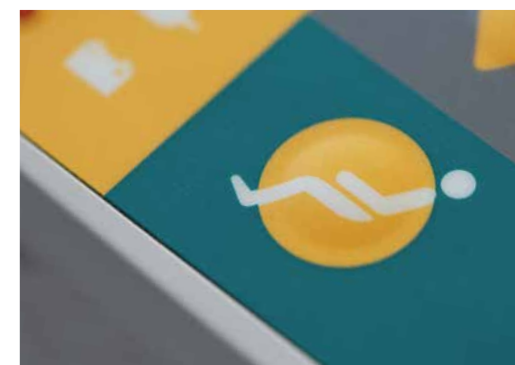

### KARDIACKÉ KŘESLO

Poloha vsedě napomáhá maximálnímu usnadnění respiračních funkcí a zvyšuje také komfort pacienta při čtení nebo jídle.



### TLAČÍTKO GO

Stiskem tlačítka GO se aktivuje ovládací panel, a to na dobu 3 minut od posledního stisknutí. Ovládací prvky se poté uzamknou a během období nečinnosti je nelze náhodně aktivovat.

# Praktické detaily

- 1

Nožní ovládání  
Praktické nožní ovládání  
pro snadnou manipulaci  
s pacientem
- 2

Horizontální  
chrániče  
Ochrana rohů lůžka
- 3

Ložná plocha  
Snadno vyjmutelná  
a čistitelná ložná plocha,  
kompatibilní s matracemi  
šířky 86 i 90 cm
- 4

Polička na  
lůžkoviny  
Vhodná i k uložení sesterského  
ovládacího panelu
- 5

Mechanické  
CPR  
Dodatečná funkce  
k elektrickému CPR pro  
urgentní použití



### Elektrické údaje

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájení                                | ±10 % 230 V standardně<br>(110 V, 127 V volitelně)                                                 |
| Maximální příkon                        | max. 1,6 A; 370 VA                                                                                 |
| Ochrana proti vniknutí<br>vody a prachu | IPX4 (bezpečnostní uzemnění s třídou<br>elektrické ochrany I pro maximální<br>bezpečnost pacienta) |

### Základní technické parametry

|                                                      |                                                                         |                                             |         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Vnější rozměry                                       | 223,5 × 99,5 cm                                                         | Výška dělených bočních plastových postranic | 40 cm   |
| Prodloužení lůžka                                    | 32 cm                                                                   | Hmotnost lůžka                              | 156 kg  |
| Výškové nastavení lůžka                              | 39,5–77,5 cm                                                            | Nosnost lůžka (bezpečné pracovní zatížení)  | 250 kg  |
| Vnitřní rozměry / (kompatibilní s šířkou<br>matrace) | 200 × 90 cm /<br>(90 nebo 86 cm)                                        | Max. hmotnost pacienta                      | 185 kg  |
| Max. výška matrace<br>s vyfukovanou ložnou plochou   | Dělené postranice 14 cm<br>Sklopné postranice<br>12 cm + extender 10 cm | Autoregrese                                 | 11 cm   |
|                                                      |                                                                         | Maximální úhel zádového dílu                | 64°     |
|                                                      |                                                                         | Maximální úhel stehenního dílu              | 32°     |
| Max. výška matrace<br>s plochými kryty z ABS         | Dělené postranice 18 cm<br>Sklopné postranice<br>16 cm + extender 10 cm | Úhel lýtkového dílu                         | 15°     |
|                                                      |                                                                         | Úhel TR/ATR                                 | 16°/16° |
|                                                      |                                                                         | Nosnost napřimovací hrazdy                  | 75 kg   |
|                                                      |                                                                         | Světlá výška podvozku                       | 15 cm   |

# Eleganza 2

Pacient

- Podpora mobilizace
- Pohodlí pro pacienta
- Osvětlení s možností přepínání



- Vylepšená ergonomie
- Automatické zastavení při úhlu 30°
- Koncepce snadného čištění



Personál

Management

- Signalizace bezpečné polohy
- Rychlé a snadné kroky servisu a údržby
- Příjemná ergonomie



**LINET**

Members of LINET Group

**LINET, spol. s r.o.**

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: [info@linet.cz](mailto:info@linet.cz) | [www.linet.cz](http://www.linet.cz)

