

# Air2Care

Aktivní alternující matrace se systémem 2 cel



Komfort a prevence dekubitů

# Účinná prevence dekubitů

Aktivní alternující systém Air2Care byl navržen tak, aby splňoval nároky na vysokou efektivitu v prevenci dekubitů až po střední riziko jejich vzniku. Alternující tlaková terapie je založena na 2celové technologii s délkou cyklu 12 minut.

- ✓ Efektivní prevence dekubitů díky alternujícímu systému a střídání tlaku v sousedních celách
- ✓ Výkonný a tichý kompresor
- ✓ Intuitivní a rychlé CPR





# Technologie a funkce

Všechny prvky antidekubitního systému Air2Care maximálně usnadňují dlouhodobou péči. Zařízení je snadno ovladatelné, praktické a vysoce funkční.

---

## Moderní konstrukce



- Matrace splňuje vysoké nároky na bezpečnost systému. Spojené cely zamezují propadnutí pacienta a usnadňují čištění.
  - Boční vzduchové válce a 3 hlavové cely jsou statické pro stabilitu a vyšší komfort pacienta.
  - Pro optimální ochranu rizikových míst jsou cely v oblasti pat o 25 % menší než ve středu matrace.
- 

## Variabilita podle individuálních potřeb



- Matrace je k dispozici ve třech variantách: model air+air, moder air+foam a overlay.
  - Pro všechny 3 varianty jsou dostupné 2 modely centrální řídicí jednotky – digitální Model 20 a analogový Model 10.
- 

## Hygiena a bezpečnost



- Kvalitní oboustranně pružný potah chrání systém matrace před proniknutím tekutin. Zároveň díky paropropustnosti materiálu odvádí nežádoucí vlhkost. Zipy usnadňují přístup k matraci a jejímu čištění – lze zcela oddělit horní a spodní, pevnější potah matrace. Zip je chráněn po celé délce klopou.
-



## 24hodinová péče

Matrace Air2Care může být doplněna o vzduchový dynamický polštář, který poskytuje pacientovi aktivní prevenci dekubitů i během sezení v křesle. Připojení vzduchové podušky je rychlé a snadné.



## Jednoduché a rychlé CPR

Intuitivní použití funkce CPR umožňuje rychlé vypuštění matrace a okamžité zahájení resuscitace.



## Transportní režim

Transportní režim udrží vzduch v systému až 12 hodin po odpojení ze sítě nebo kontrolní jednotky.

# Technické specifikace



## Model 20

- Pracovní režimy: alternující tlaková terapie (APT), režim s konstantně nízkým tlakem (CLP) a režim s maximálním tlakem (MAX).

Air2Care 10 kontrolní jednotka	
Rozměry	12 × 26 × 21,5 cm
Hmotnost	2,5 kg
Časový interval	12 minut
Alarm	vizuální
Elektrická bezpečnost	v souladu s EN 60601-1 Třída II s aplikovanými částmi typu B

Specifikace matrace	
Matrace replacement systém	
Rozměry	200 × 86 × 17 cm
Maximální nosnost matrace	200 kg (vzduchová a pěnová vrstva)
Matrace overlay systém	
Rozměry	200 × 86 × 9,3 cm
Maximální nosnost matrace	180 kg
Dynamický sedák	
Rozměry	45 × 50 × 12,5 cm
Maximální nosnost sedáku	127 kg

## Model 10


- Pracovní režimy: alternující tlaková terapie (APT) a statický režim.

Air2Care 20 kontrolní jednotka	
Rozměry	12 × 26 × 21,5 cm
Hmotnost	2,5 kg
Časový interval	12 minut
Alarm	vizuální a zvukový
Elektrická bezpečnost	v souladu s EN 60601-1 Třída II s aplikovanými částmi typu B

Specifikace matrace	
Matrace replacement systém	
Rozměry	200 × 86 × 17 cm
Maximální nosnost matrace	210 kg (dvojitá vzduchová vrstva) 200 kg (vzduchová a pěnová vrstva)
Dynamický sedák	
Rozměry	45 × 50 × 12,5 cm
Maximální nosnost sedáku	127 kg


## Variabilní řešení

Pro všechny typy matrací jsou dostupné obě varianty kompresorů (10 a 20), včetně funkčního podsedáku.

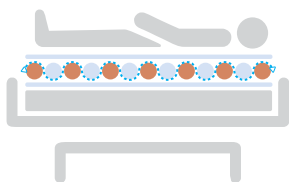


Air2Care model 10  
Overlay

(vzduchová aktivní vrstva se používá na stávající matraci)

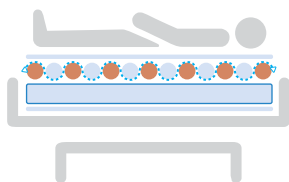


Air2Care model 10  
Replacement

(komplet = vzduchová vrstva + pěnová vrstva)

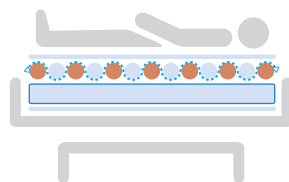

Air2Care model 20  
Replacement

(komplet = vzduchová vrstva + pěnová vrstva)

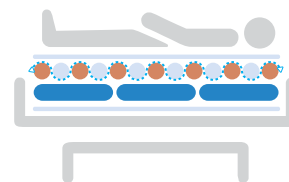

Air2Care model 20  
Replacement

(komplet = 2 vzduchové vrstvy)



■ ■ wissner-  
■ ■ bossert

**LINET**

---

Members of LINET Group

**LINET spol. s r.o.**

Želečice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



[www.linet.cz](http://www.linet.cz)